

Информационное письмо

ООО «Олимпас Москва», официальный представитель на территории России и СНГ компании Olympus Europa SE & CO. KG (Германия), являющейся представителем производителя оборудования Olympus Medical Systems Corporation (Япония) в Европейском регионе, настоящим письмом выражает Вам свое почтение и сообщаем следующее.

На основании произведенных испытаний на совместимость дезинфицирующих средств с эндоскопическим оборудованием (гибкими эндоскопами) производства Olympus Medical Systems Corporation (Япония), а также возможность использования этих средств в репроцессорах OER-A/OER-AW, компанией рекомендуются к использованию следующие средства:

Для ручной обработки

Торговая марка	Производитель	Активное вещество	Совместимость с эндоскопами OLYMPUS
CIDEX	Johnson & Johnson	Глутаральдегид	Совместим
CIDEX OPA	Johnson & Johnson	Ортофталевый альдегид	Частичная совместимость*
NU-CIDEX	Johnson & Johnson	Надуксусная кислота	Совместим
SEKUSEPT Aktiv	Ecolab GmbH & Co.	Надуксусная кислота	Совместим
SEKUSEPT Plus	Ecolab GmbH & Co.	Глюкопротамин	Совместим (протестировано с минизондами OLYMPUS)
SEKUSEPT Pulver + Aktivator	Ecolab GmbH & Co.	Надуксусная кислота	Совместим
STERANIOS 2%	Anios	Глутаральдегид	Совместим
LISOFORMIN 3000	Lizoform	Глутаральдегид	Совместим
GIGASEPT	Shulke&Mayr	Глутаральдегид + Формальдегид	Совместим

*возможны внешние изменения (окрашивание трубок, обесцвечивание клеевых соединений)

Для использования в репроцессорах OER-A/OER-AW

Торговая марка	Производитель	Активное вещество	Совместимость с эндоскопами OLYMPUS
ACECIDE	Saraya	Надуксусная кислота	Совместим
CIDEX	Johnson & Johnson	Глутаральдегид	Совместим

Обращаем Ваше внимание, что пользование несовместимым оборудованием может привести к травмам пациента или оператора и к повреждению и/или неисправности оборудования. Проверку и очистку оборудования необходимо выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в Инструкции по обработке аппаратов, включая выбор моющего и дезинфицирующего средства, в противном случае функционирование и работоспособность оборудования не гарантируется.

Благодарим за сотрудничество.

С уважением,

Чинарова В.В.

Консультант по продукту CDS

ООО «Олимпас Москва»



17.10.2017

ООО «Олимпас Москва»

Электровзводская улица 27, стр.8, Москва, 107023

ИНН 7703026005 ОГРН 1027700273556

тел. + 7 495 926 70 77, e-mail: info@olympus-europa.com

<http://www.olympus.com.ru/>